

Fotodokumentation zur Entonox-Anwendung

Vor Gebrauch:



1. Stecker in die Schnellkupplung stecken, bis die Kupplungshülse einrastet.



2. Flaschenventil gegen den Uhrzeigersinn in Pfeilrichtung + öffnen.
(mind. 1 Umdrehung)



3. Ausatemventil aufsetzen. (Mundstück kann entsorgt werden)



4. Filter aufsetzen

Maske mit Duftstiften "anmalen"



5. Maske aufsetzen

es können auch unsere Duftmasken verwendet werden.

Nach Gebrauch



6. Flaschenventil wieder schliessen und System entlüften (in der Mitte drücken, bis Druck vollständig abgelassen ist)

Information zum Füllstand:



ENTONOX® Therapiesystem
Der Arzneimittelbehälter: Nutzungskapazität

PanGas

Flaschendruck	4/4 170 bar	3/4 128 bar	1/2 85 bar	1/4 43 bar
5 Liter ENTONOX	1400 l	990 l	570 l	240 l
Anwendungen	21	14	7	2
10 Liter ENTONOX	2800 l	1980 l	1140 l	480 l
Anwendungen	42	28	14	4
20 Liter ENTONOX	5600 l	3960 l	2280 l	960 l
Anwendungen	84	56	28	8

Berechnungsbasis: 90 % nutzbarer Inhalt, 60 Liter pro Anwendung à 15 min

- Alle Angaben beziehen sich auf die Nutzung eines Demandventils
- Bei kontinuierlicher Zufuhr über das Dauerfluss-System kann sich die Anzahl der Anwendungen deutlich reduzieren.

18

Anzeige Füllstand



Flasche wird so im Ausguss hinter der Türe versorgt.
Es gibt dort eine 10 Liter Reserve-Flasche.